

TEMPRON ТЕМПРОН

ПЛАСТМАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ

Материал предназначен только для профессионального применения
соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для изготовления временных коронок, мостов и протезов.
Для заполнения дефектов зубного ряда с целью поддержания
пространственных соотношений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать у пациентов, имеющих в анамнезе аллергию на
метакрилатные мономеры и/или метакрилатные полимеры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

А. КОРОНКИ

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- Заполните дефекты зуба CAVITON или другим подходящим
временным пломбировочным материалом.
- Снимите оттиск с помощью густо замешанного (т.е. с использованием
меньшего количества воды, чем рекомендовано в инструкции)
альгинатного оттискового материала. Заверните оттиск во влажную
марлю, чтобы он не высох и не деформировался.
- Отпрепарируйте зуб, на который будет фиксироваться коронка.
- Прорежьте V-образные канавки от десневого края до щечной и
язычной стороны предварительно снятого оттиска, по которым
будут вытекать излишки пластмассы.

2. ЗАМЕШИВАНИЕ

- Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет
1,0 г / 0,5 мл (порошок - до первого деления мерного стаканчика,
жидкость - до первого деления мерной пипетки).

Примечание:

Для уменьшения усадки используйте как можно меньшее количество
жидкости.

- Поместите необходимое количество жидкости в чашку для
замешивания, и постепенно добавляйте соответствующее
количество порошка. Замешайте в течение 20-30 секунд.

3. НАНЕСЕНИЕ

- Заполните полученной кремообразной пастой подготовленный
оттиск и надежно установите его в полости рта.
- Через 3 минуты извлеките оттиск изо рта, так, чтобы на зубе
осталась пластмасса в тестообразном состоянии.
- Снимите с зуба коронку из еще не полностью затвердевшей
пластмассы и погрузите ее в теплую воду (примерно 50°C/122°F).
Рекомендуется быстро погружать и вынимать ее из воды несколько
раз, чтобы предотвратить чрезмерную усадку.
- Удалите излишки с помощью бора, затем отполируйте готовую коронку.
- Зацементируйте коронку с помощью FREEGENOL TEMPORARY PACK
или другого подходящего временного фиксирующего цемента.

В. МОСТЫ

1. ПОДГОТОВКА

- Выберите подходящий искусственный зуб и зафиксируйте его между
опорными зубами, используя подходящий воск. Проверьте окклюзию.
- Снимите полный оттиск всей зубной дуги, используя альгинатный
слепочный материал. Осторожно удалите мост и заверните оттиск во
влажную марлю.
- Соответствующим образом подготовьте опорные зубы.
Последующие процедуры проводятся, как описано выше для
коронок в разделах А. 1 (а) - А. 3 (е).

ХРАНЕНИЕ

Для сохранения эффективных рабочих характеристик материала храните
в прохладном месте, недоступном для прямых солнечных лучей
(4-25°C) (39.2-77.0°F).

УПАКОВКА

- Бутылочка порошка 100 г
- Бутылочка с жидкостью 100 г (104 мл)
- Упаковка 1-1: 100 г порошка, 100 г (104 мл) жидкости, аксессуары

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Жидкость является летучим и огнеопасным веществом.
Закрывайте бутылочку сразу же после использования и держите ее
вдали от источников открытого пламени.
- При попадании в глаза немедленно промойте большим
количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.
- Не рекомендуется использование оттискового материала на основе
полисульфидной резины.
- При работе всегда используйте средства индивидуальной защиты
(PPE) – перчатки, защитные маски, защитные очки.
- В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась повышенная
чувствительность к материалу. В случае возникновения аллергических
реакций необходимо прекратить использование материала и
обратиться к врачу соответствующей специализации.

Некоторые продукты, упоминаемые в настоящей Инструкции, могут быть
классифицированы как опасные в соответствии с Согласованной на
глобальном уровне системой классификации и маркировки химических
веществ (GHS). Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами
безопасности (safety data sheets), доступными по ссылке:

<http://www.gceurope.com>

Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего поставщика.

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

МНОГОРАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: во
избежание перекрестной передачи микрофлоры от пациента к пациенту
инструменты подобных систем требуют проведения дезинфекции
промежуточного уровня. Сразу после применения проверьте инструмент и
заводские метки на предмет повреждений. В случае обнаружения
повреждений немедленно прекратите использование инструмента.
НЕ ПОГРУЖАТЬ В ЖИДКОСТЬ. Тщательно очищайте инструмент во
последующем образовании скоплений загрязняющих частиц и их последующего
присыхания к поверхности инструмента. Производите дезинфекцию,
используя одобренные органами здравоохранения средства инфекционного
контроля, рекомендованные для проведения дезинфекции промежуточного
уровня; в процессе проведения дезинфекции соблюдайте соответствующие
нормативы регионального/национального правового регулирования.

Для получения краткой информации о безопасности и клинической
эффективности (SSCP), пожалуйста, обратитесь к базе данных EUDAMED
(<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) или свяжитесь с нами по адресу
Regulatory.gce@gc.dental

Информация о нежелательных событиях, которые имеют признаки
неблагоприятного события (инцидента) при использовании вышеуказанного
материала на территории Российской Федерации, может быть направлена
уполномоченному представителю производителя в РФ, ООО «Крафтвэй
Фарма»: e-mail: dental@kraftway.ru; <http://www.kraftwaydental.ru>, 129626, г.
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, строение 60, комната 30, помещение I,
этаж 5, 8 495 232-69-33.

Последняя редакция: 10/2022